

ATS

Suction Line

ATS
REF. 9108481

Instruções de Uso **N3313031/6ptbr**

Antes de utilizar o produto verifique se a versão desta Instrução de Uso corresponde à versão informada na embalagem do produto. Para obter as Instruções de Uso também em formato impresso, sem custo adicional, contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do SAC 0800-707-3855 ou através do e-mail fresenius.br@fresenius-kabi.com

Descrição:

Linha de sucção para aspirar e anticoagular o sangue do campo cirúrgico para um reservatório de autotransusão com um local de sucção de 1/4", conectado a uma fonte de vácuo.

Precauções e avisos:

1. Leia todas as instruções, avisos e precauções antes do uso.
2. O produto somente deve ser manuseado por pessoal treinado e qualificado.
3. Estéril (Óxido de etileno) e apirogênico. Utilizar somente se a embalagem e o produto não estiverem danificados.
4. Indicado para utilização apenas uma vez num único paciente.
5. A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial de contaminação dos mesmos. Isto poderá originar infecções no paciente, dador ou utilizador e estas poderão levar a doença ou morte desse mesmo paciente, dador ou utilizador.
6. Utilizar técnicas assépticas durante todos os estágios de montagem e uso.
7. Pressões de vácuo superiores a 100 mmHg podem resultar em alto índice de hemólise.
8. Após o uso, esse produto pode conter material infeccioso. Destruir o produto de acordo com a regulamentação médica vigente.
9. Este produto contém DEHP (ftalato de 2-etilhexilo), um plastificante que se suspeita ser tóxico para a reprodução. Se possível, deve evitar-se o tratamento repetido ou prolongado com este ou outro produto que contenha DEHP por crianças, ou mulheres grávidas ou a amamentar. Os médicos devem avaliar as vantagens da utilização contra os riscos previsíveis.

Instruções para uso:

1. Passar a linha de sucção para o campo estéril usando técnicas assépticas.
2. Retirar a câmara de gotejamento/extremidade do conector de entrada da linha de sucção do campo estéril.
3. Remover a tampa (1) e conectá-lo ao sítio de entrada de 1/4" do reservatório de coleta.
4. Conectar a ponteira de sucção ao sítio de entrada (2).
5. Fechar o rolete (3) na linha do anticoagulante (4) e a câmara de anticoagulante do penetrador. Abrir a válvula de aeração na câmara de gotejamento (5) se estiver usando uma garrafa.
6. Ligar o vácuo e ajustar para 100 mmHg ou menos.
7. Realizar o prime na linha do anticoagulante e no reservatório aspirando o anticoagulante.
8. Ajustar o fluxo do anticoagulante para manter a anticoagulação adequada durante a coleta de sangue.



Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Alemanha

Registrado e Distribuído no Brasil por:

Fresenius Hemocare Brasil Ltda.

Rua Roque Gonzáles, 128, Jd. Branca Flor,

06855-690, Itapecerica da Serra, Brasil

Registro ANVISA n. 10154450161

SAC 0800-707-3855

