


ATY

ATY

REF. 9108401

Instruções de Uso **N3313041-4ptbr**

Antes de utilizar o produto verifique se a versão desta Instrução de Uso corresponde à versão informada na embalagem do produto. Para obter as Instruções de Uso também em formato impresso, sem custo adicional, contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do SAC 0800-707-3855 ou através do e-mail fresenius.br@fresenius-kabi.com

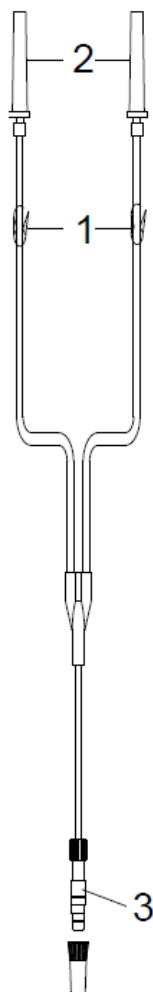

A explicação dos símbolos utilizados nos rótulos e nas embalagens é dada em folheto anexo (N3313451).

ATY Y-adapter (Adaptador em Y)

Descrição do dispositivo:

Adaptador em Y para conectar dois reservatórios de autotransusão em um equipamento de autotransusão com um conector fêmea de 1/4".

Precauções e avisos:

1. Leia todas as instruções, avisos e precauções antes do uso.
2. O produto somente deve ser manuseado por pessoal treinado e qualificado.
3. Estétil (Óxido de etileno) e apirogênico. Utilizar somente se a embalagem e o produto não estiverem danificados.
4. Estétil (Óxido de etileno) e apirogênico. Utilizar somente se a embalagem e o produto não estiverem danificados.
5. A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial de contaminação dos mesmos. Isto poderá originar infecções no paciente, dador ou utilizador e estas poderão levar a doença ou morte desse mesmo paciente, dador ou utilizador.
6. Utilizar técnicas assépticas durante todos os estágios de montagem e uso.
7. Assegurar que todas as conexões se encaixam perfeitamente.
8. Após o uso, esse produto pode conter material infeccioso. Destruir o produto de acordo com a regulamentação médica vigente.
9. Este produto contém DEHP (ftalato de 2-etilhexilo), um plastificante que se suspeita ser tóxico para a reprodução. Se possível, deve evitar-se o tratamento repetido ou prolongado com este ou outro produto que contenha DEHP por crianças, ou mulheres grávidas ou a amamentar. Os médicos devem avaliar as vantagens da utilização contra os riscos previsíveis.

Instruções para uso:

1. Fechar os clamps nas linhas de saída dos reservatórios e do adaptador em Y (1).
2. Remover as tampas (2) e ligar os conectores de 1/4" às linhas de saída do reservatório.
3. Remover a tampa vermelha do conector de saída (3) e conectar à linha de entrada de sangue do equipamento de autotransusão.
4. Controlar a direção do fluxo de cada reservatório para o sistema de autotransusão utilizando a posição do clamp no adaptador em Y.



Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Alemanha

Registrado e Distribuído no Brasil por:

Fresenius Hemocare Brasil Ltda.

Rua Roque Gonzáles, 128, Jd. Branca Flor,
06855-690, Itapeverica da Serra, Brasil

Registro ANVISA n. 10154450161

SAC 0800-707-3855