
EQUIPO VOLUMAT AGILIA VL TR00

REF BRM46442800S / M46442800S – VL TR00

VERSÃO DE INSTRUÇÃO DE USO: BRM46442800S /V00

REVISADO EM: 14/04/2022

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO




PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM

MONTAR O SISTEMA

1. O Equipo Volumat Agilia VL ST10 deverá estar em condições de temperatura normais: +18°/+30°C.
 2. Prepare o recipiente de solução (bolsa/ frasco) com a linha de infusão correspondente, em conformidade com os procedimentos de infusão padrão.
- Importante: o recipiente de solução deverá estar em condições de temperatura normais: +18°/+30°C.

PREENCHIMENTO DO EQUIPO USANDO UMA BOLSA

1. Introduza a ponta perfurante completamente dentro da bolsa (pinça rolete com corta fluxo – entrada de ar fechada).
2. Pressione a bolsa para a retirada do ar, e encha a câmara de gotejamento até 1/2 a 2/3 de sua capacidade.
3. Pendure a bolsa em posição invertida e deixe o líquido fluir para o equipo.

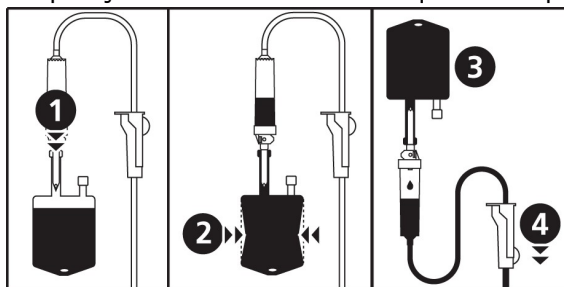

4. Quando o equipo estiver totalmente preenchido, feche a pinça e verifique a ausência de bolhas de ar.

ACIONAMENTO DA BOMBA VOLUMAT AGILIA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE INFUSÃO:

INSTALAÇÃO DO EQUIPO DE INFUSÃO

1. Abrir a porta da bomba levantando a alavanca da porta.
-

EQUIPO VOLUMAT AGILIA VL TR00

Nota: A bomba é automaticamente ligada quando estiver conectada à energia elétrica. Se não estiver, pressione a tecla <ON> [LIGAR]. Um autoteste verifica a funcionalidade da bomba. Certifique-se de que todos os LEDs e sinais sonoros estejam ativados.

2. Quando o autoteste estiver OK, uma tela de alarme aparece para indicar que você pode iniciar a instalação do equipo.

Nota: Os LEDs vermelhos piscando indicam um alarme. Se nenhuma providência for tomada em 2 minutos, um sinal sonoro soará.

Pressione a tecla <SILENCE ALARM> [ALARME SILENCIOSO].

A. Alinhar o tubo do equipo horizontalmente ao longo dos guias do tubo de modo que o conector verde fique posicionado à direita

B. (verde) e o clamp azul fique posicionado na frente do guia do clamp (azul).

C. Inserir o conector verde na fenda verde.

D. Posicionar o SafeClip Azul na sua fenda azul e então empurrar o clamp para posicionar a dobradiça esférica no lugar.


E. Certifique-se de que o tubo está no guia de tubo esquerdo, e então empurre a alavanca da porta para fechar a porta da bomba.

3. O Sistema de Verificação da Oclusão automaticamente interrompe o fluxo da linha, ativa o real bombeamento e verifica o aumento da pressão.

O teste de OCS verifica o correto posicionamento do equipo e a oclusão da bomba, protegendo assim a bomba contra o risco de fluxo livre.

4. Manter o recipiente longe da bomba.

O recipiente deve ser colocado 20 a 80 cm acima da bomba (h).

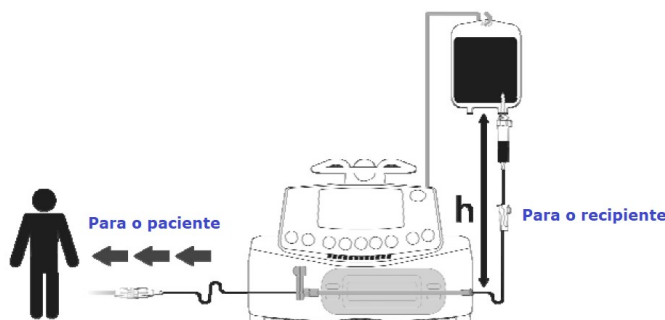


DESINSTALAÇÃO DO EQUIPO DE INFUSÃO

Retirar o equipo puxando o clamp de segurança e o equipo de administração.



EQUIPO VOLUMAT AGILIA VL TR00

LIBERAÇÃO DO SAFECLIP

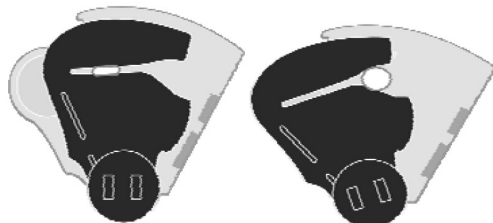

Fluxo Interrompido

Fluxo Liberado

PRECAUÇÕES RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO, BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Produto médico de uso único.
- Não utilizar após a data de validade.
- Este dispositivo é estéril. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada.
- Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade

INDICAÇÕES:

- Transfusão de hemoderivados disponíveis em bolsas

CONTRAINDICAÇÕES:

- Frascos.
- Infusão de medicamentos / fluidos que exigem filtração com um filtro de diâmetro estreito.
- Infusão de medicamentos conhecidamente incompatíveis com PVC (por exemplo, trinitrina, dinitrato de isosorbida, nitroprussiato de sódio ...).
- Medicamentos sensíveis à luz (a menos que outras precauções sejam tomadas para proteger o medicamento contra a luz direta).

VANTAGENS

- Ausência de lixiviação de DEHP.
- Segurança do bom posicionamento do equipo na bomba.
- Segurança contra o fluxo livre quando o equipo é retirado da bomba.
- Reconhecimento do equipo pela bomba.
- Preparação e priming semelhantes aos do equipo de infusão por gravidade.
- Controle visual da infusão.
- Não há risco de alergia ao látex.

FABRICADO POR:

Fresenius Kabi AG

Else Kröner-Str. 1
61352, Bad Homburg
Alemanha

IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada, 1652
Barueri-SP
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04

EQUIPO VOLUMAT AGILIA VL TR00

SAC: 0800 707 3855

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Cíntia Motta Pereira Garcia

CRF-SP: 34.871

Registro ANVISA nº 80145110190

Estéril – Óxido de Etileno

Produto de uso único. Proibido reprocessar

Manter em temperatura ambiente, protegido de umidade e da luz solar.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS E EMBALAGENS DO PRODUTO:



Para utilização por pressão



Consultar instruções de uso



Produto de uso único




Produto apirogênico



Não usar o produto ou seu conteúdo caso aparente algum sinal de deterioração



Esterilizado por Óxido de Etileno

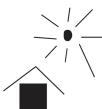

Manter longe da luz solar



20 gotas de água destilada equivalem a um volume de 1 mL \pm 0,1 mL



Manter seco

Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto.

