



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Peripherer venöser Zugang Venodrop® Safe

Mit Sicherheit punktieren





Venodrop® Safe

Nadelstichverletzungen sind vermeidbar

Beschäftigte im Gesundheitsdienst wie Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, Medizinische Fachangestellte stehen täglich in Kontakt mit Patienten. Beim Umgang mit Blut, Blutprodukten oder anderen Körperflüssigkeiten muss immer damit gerechnet werden, dass diese möglicherweise infektiös sind.

In Deutschland kommt es jedes Jahr zu schätzungsweise 500.000 Nadelstichverletzungen, diese verursachen Kosten von etwa 50 Mill. Euro.¹

Eine der wirksamsten Maßnahmen zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen ist die Verwendung von sogenannten Sicherheitsgeräten. Die technische Regel für biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen (TRBA 250) definiert die Vorschriften zur Prävention von Nadelstichverletzungen. Zum Beispiel stellt die TRBA 250 in ihrer aktuellen Fassung klar, dass es zu vermeiden ist, in einem Arbeitsbereich für vergleichbare Tätigkeiten sowohl Sicherheitsgeräte als auch herkömmliche Instrumente einzusetzen.

Venodrop® Safe

Für Anwender-Sicherheit bei peripherer Venenpunktion

Sicherheit während der Anwendung

- Scharfer 3-fach Facetten-Schliff der Punktionskanüle unterstützt aufgrund des geringen Einstichwinkels die unkomplizierte und möglichst schmerzarme Punktion.
- Die großen Flügel besitzen die ausgewogene Flexibilität um nachzugeben, wenn notwendig, und entsprechende Stabilität zur atraumatischen Fixierung während einer Kurzzeit-Infusion.
- Alle Venodrop® Safe Varianten bieten genau dieselbe haptische Technologie. Sie liegen optimal in der Hand und der Anwender fühlt die Position während des gesamten Venenpunktions-Prozesses.




Sicherheit nach der Anwendung

- Der Venodrop® Safe Sicherheitsmechanismus unterstützt durch Einhandbedienung sowie fühl- und hörbares Einrasten in die Sicherheitsposition die Fehlervermeidung während des Arbeitsablaufs.
- Aufgrund der Form und Funktion entspricht Venodrop® Safe den Anforderungen der TRBA 250 bzgl. „Prävention von Nadelstichverletzungen“.
- Bei folgenden Tätigkeiten wird eine Infektionsgefährdung Dritter durch eine Nadelstichverletzung angenommen:
 - Blutentnahmen
 - Punktionen zur Entnahme von Körperflüssigkeiten
 - Legen von Gefäßzugängen



Venodrop® Safe Empfohlene Handhabung

Verpackungsdesign, Nadel- und Produktfunktion unterstützen die gewohnten Abläufe während der Venenpunktion.

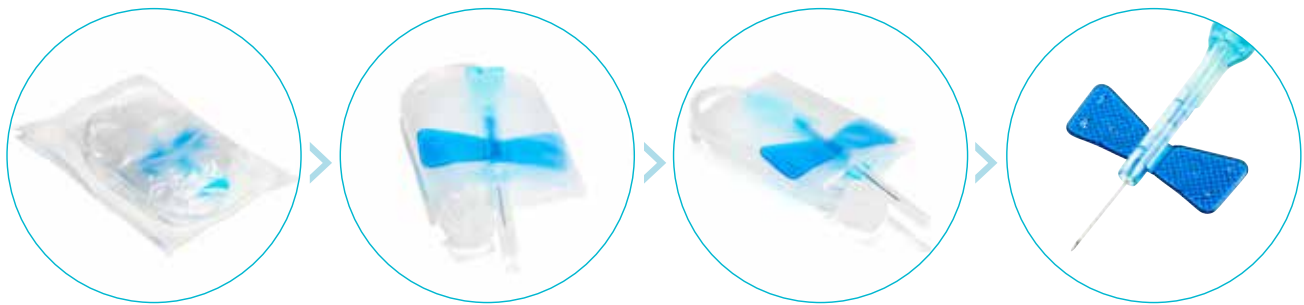

- ① Wir empfehlen, vor dem Punktionsbeginn den Sicherheitsmechanismus in Richtung der Flügel zu positionieren.



- ② Führen Sie die Punktion wie gewohnt durch.



- ③ Nach der Kurzzeitinfusion/Blutentnahme decken Sie die Punktionsstelle mit einem Tupfer ab. Mit der anderen Hand fixieren Sie den Sicherheitsmechanismus zwischen Daumen und Zeigefinger und gleichzeitig den Schlauch mit den restlichen Fingern in der Handinnenfläche.



- ④ Halten Sie den Schlauch straff und schieben Sie den Sicherheitsmechanismus über die Kanüle, bis er fühl- und hörbar einrastet. Komprimieren Sie die Punktionsstelle.



- ⑤ Bitte entsorgen Sie das Sicherheits-Venenpunktionsbesteck entsprechend den Vorschriften Ihres Hauses.

Venodrop® Safe


Die Modellvielfalt von Venodrop® Safe Sicherheits-Venenpunktionsbesteck

Venodrop® Safe bietet den gewohnten Komfort, eine einfache und intuitive Handhabung und garantiert somit ein konzentriertes Arbeiten.

- Länge der Verlängerungsleitung: 30 cm
- Füllvolumen der Verlängerungsleitung: 0,48 ml
- LuerLock-Anschluss



Die farbliche Kennzeichnung der Flügel gewährleistet eine sichere Identifikation der unterschiedlichen Gauge-Varianten.

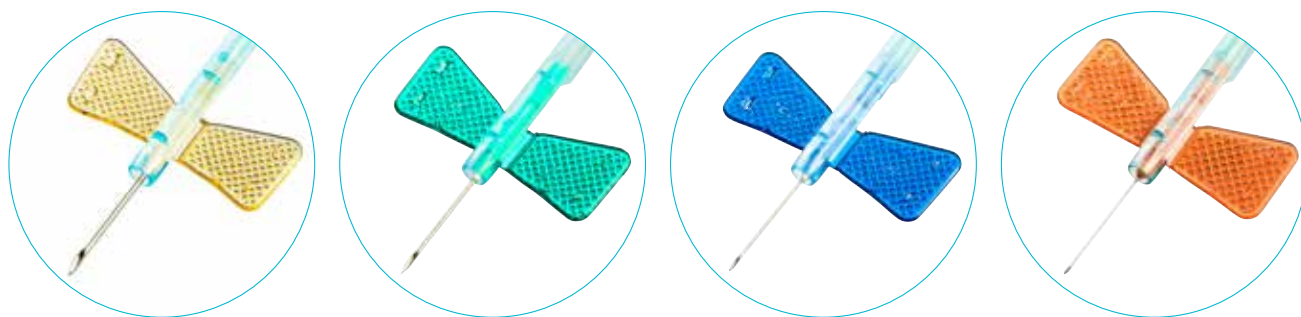

Bestellinformationen

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Gauge [G]	Länge [mm]	Farbe	HiMi.-Nr.
Venodrop® Safe	50	3274850	15405122	19	19	Yellow	03.99.99.1032
Venodrop® Safe	50	3274851	15405139	21	19	Green	03.99.99.1032
Venodrop® Safe	50	3274852	15405145	23	19	Blue	03.99.99.1032
Venodrop® Safe	50	3274853	15405151	25	19	Orange	03.99.99.1032

Latex-frei
DEHP-frei**

* Verpackungseinheit ** Gemäß Verordnung (EC)1907/2006 (REACH) weniger als 0,1 % w/w DEHP
*** Bitte beachten Sie die jeweilige regionale Sprechstundenbedarfsvereinbarung

Abrechenbarer
Sprechstunden-Bedarf***



wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

Arzneimittel

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

Infusionen

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

Medizinprodukte

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de