

wir helfen Menschen

Ernährung

Infusionen

Arzneimittel

Medizinprodukte


ENFit™-Verbindungssystem - Fresenius Kabi

Standard- und Spezialkonnektionen

INTERAKTIVE PRÄSENTATION
Bitte beachten Sie die Erläuterung der aktiven Schaltflächen
auf Folie 3

ENFit™-Verbindungssystem

Erläuterung der aktiven Schaltflächen

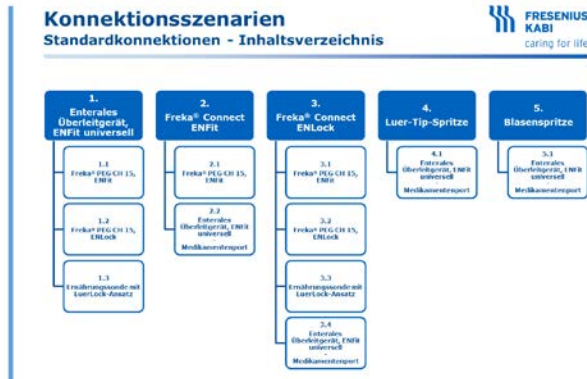

Auswahl eines Konnektionsszenarios:

Wählen Sie Ihr gewünschtes Konnektionsszenario aus dem Inhaltsverzeichnis (Seite 4 - 5). Jedes der dort abgebildeten Szenarien ist eine aktive Schaltfläche. Durch einmaliges Drücken auf das gewünschte Szenario gelangen Sie zu der entsprechenden (bebilderten) Lösung.

Home-Button:


Durch Mausklick auf den „Home-Button“ erfolgt die Weiterleitung zum jeweiligen Inhaltsverzeichnis.

Zurück-Button:

Durch Mausklick auf den „Zurück-Button“ erfolgt die Weiterleitung zur zuletzt aufgerufenen Seite.


ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen - Inhaltsverzeichnis

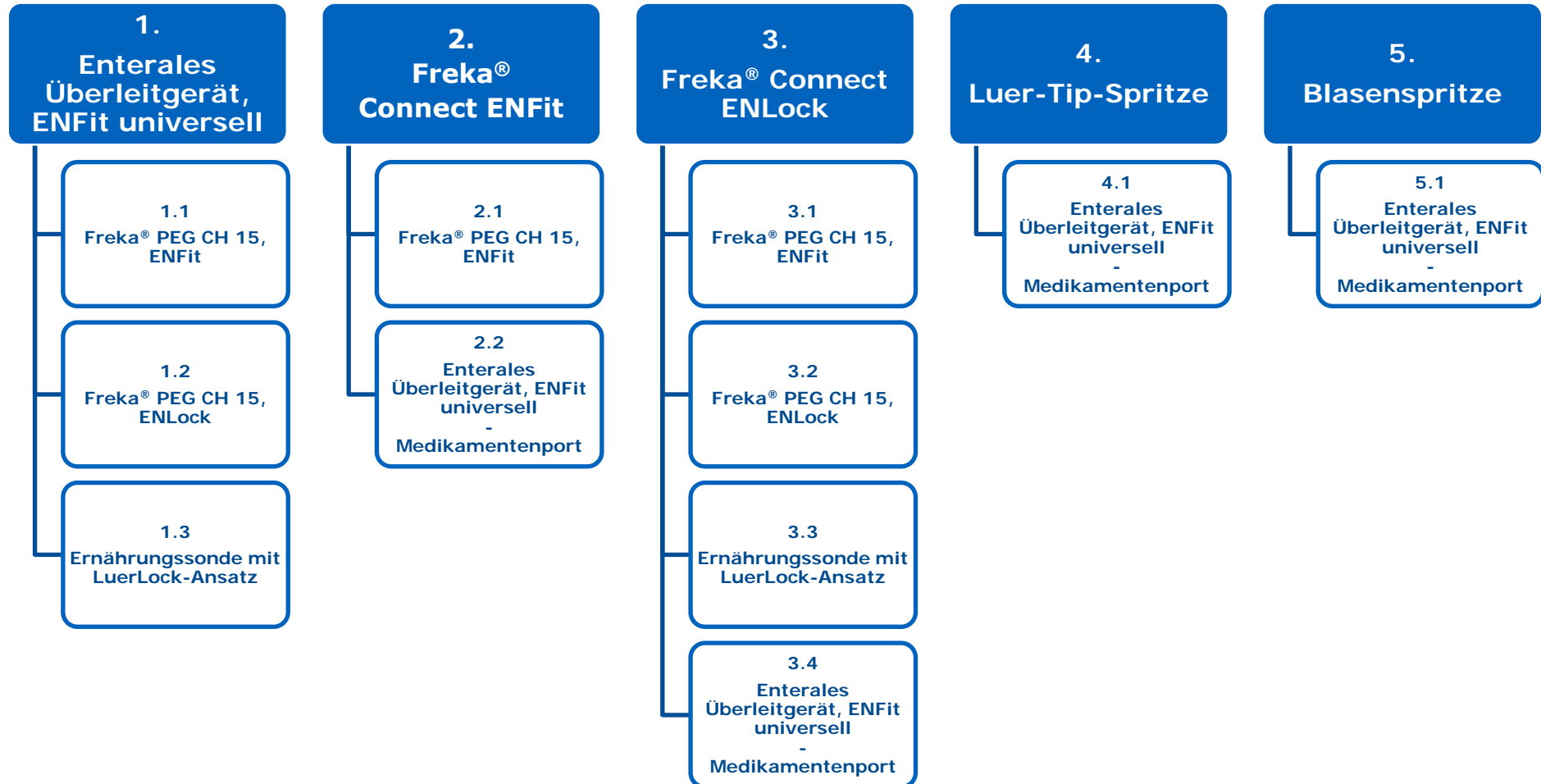


6.

Enterales Überleitgerät ENFit, universell

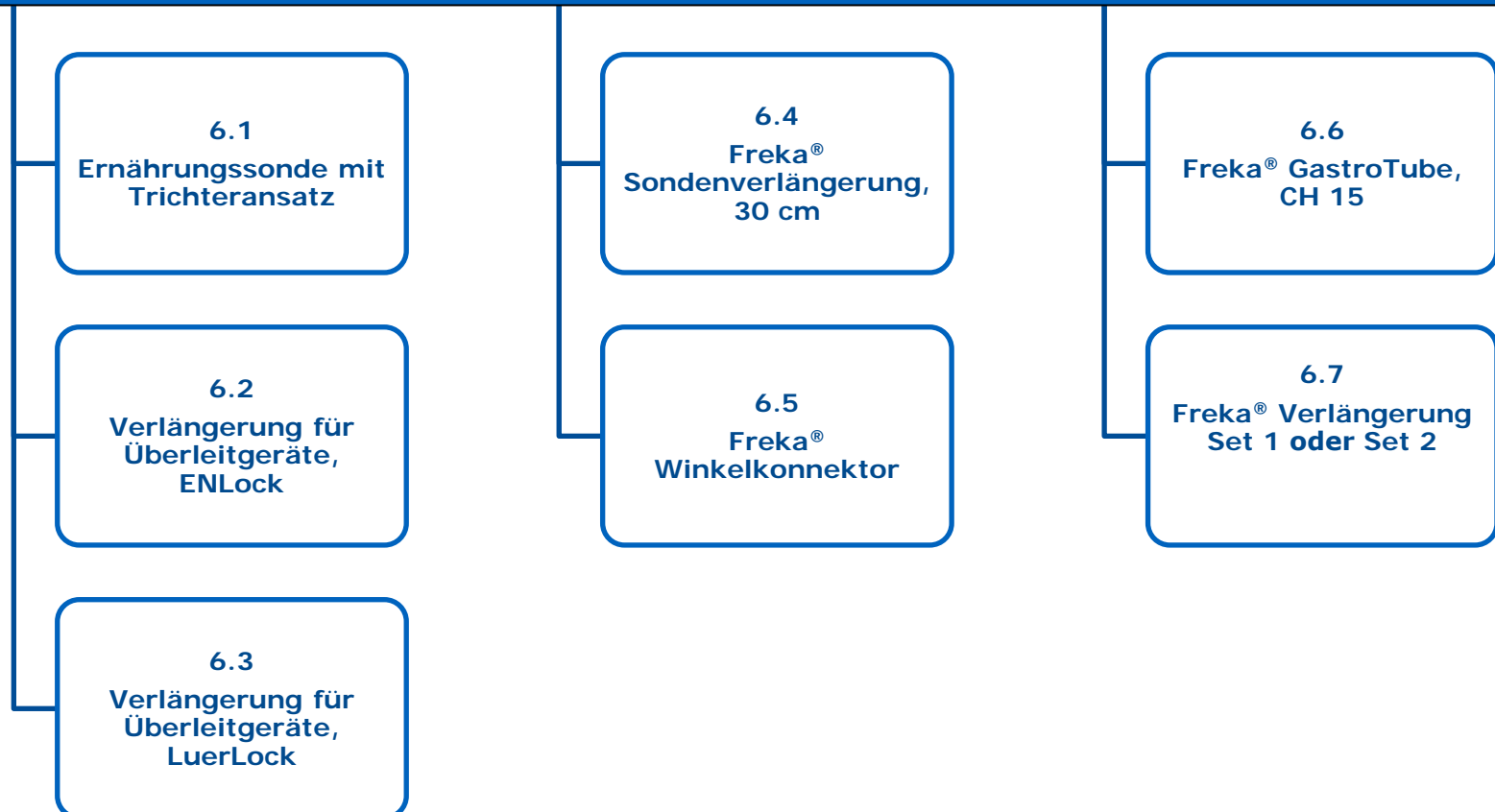

ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 1.1

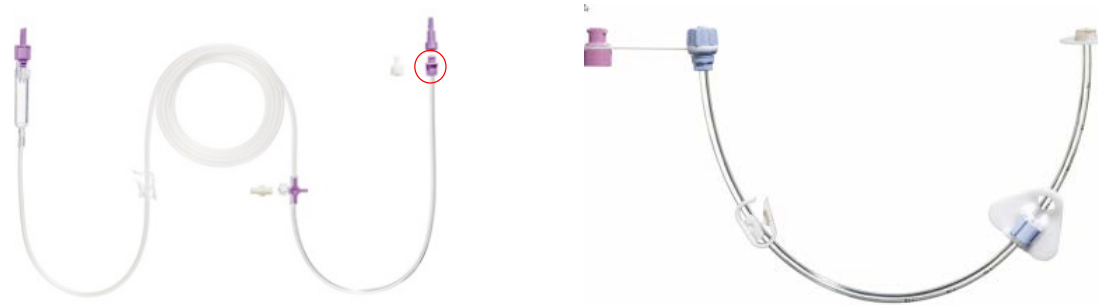

Enterales
Überleitgerät, ENFit
universell

+

Freka® PEG, ENFit

=



ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 1.2



Enterales
Überleitgerät, ENFit
universell

+

Freka® PEG, ENLock

=



ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 1.3



ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 2.1



Freka® Connect ENFit

+

Freka® PEG, ENFit

=



ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 2.2



Freka® Connect ENFit

+


Enterales
Überleitgerät, ENFit
universell

=



ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 3.1

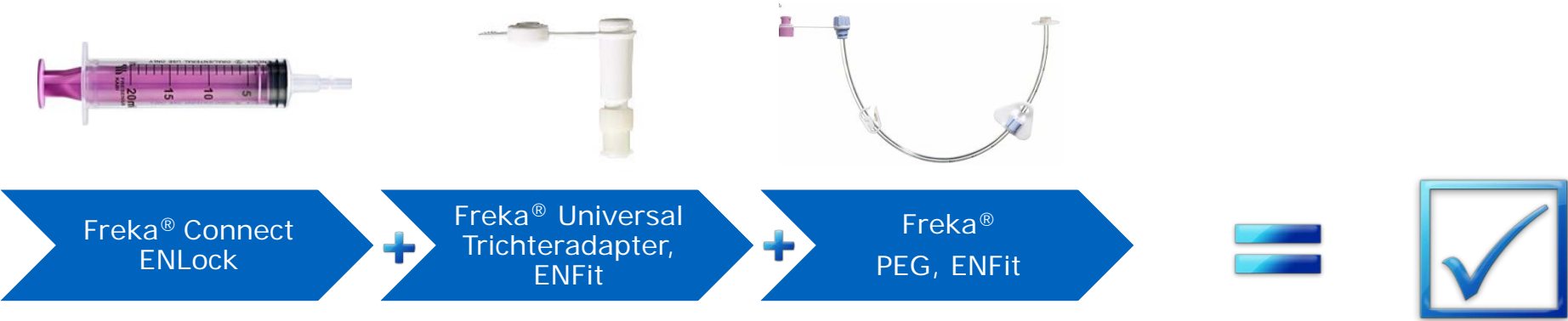

ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 3.2



Freka® Connect ENLock

+

Freka® PEG, ENLock

=



ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 3.3



ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 3.4



Freka® Connect
ENLock

+


Enterales
Überleitgerät, ENFit
universell

=



ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 4.1

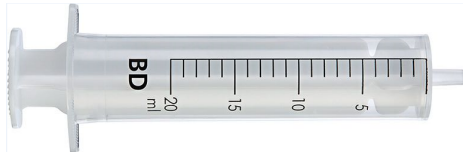

Spritze Luer-Tip-Ansatz

+

Enterales
Überleitgerät, ENFit
universell

=




ENFit™-Verbindungssystem

Standardkonnektionen – Lösung 5.1



ENFit™-Verbindungssystem

Spezialkonnektionen – Lösung 6.1

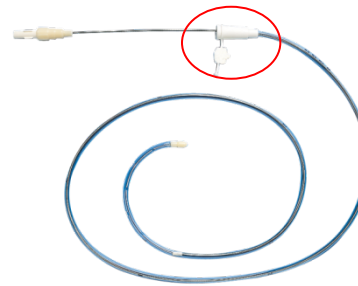

Enterales
Überleitgerät, ENFit
universell

+

Sonde mit
Trichteransatz

=



ENFit™-Verbindungssystem

Spezialkonnektionen – Lösung 6.2



Enteriales
Überleitgerät, ENFit
universell

+


Verlängerung für
Überleitgeräte, ENLock

=



ENFit™-Verbindungssystem

Spezialkonnektionen – Lösung 6.3

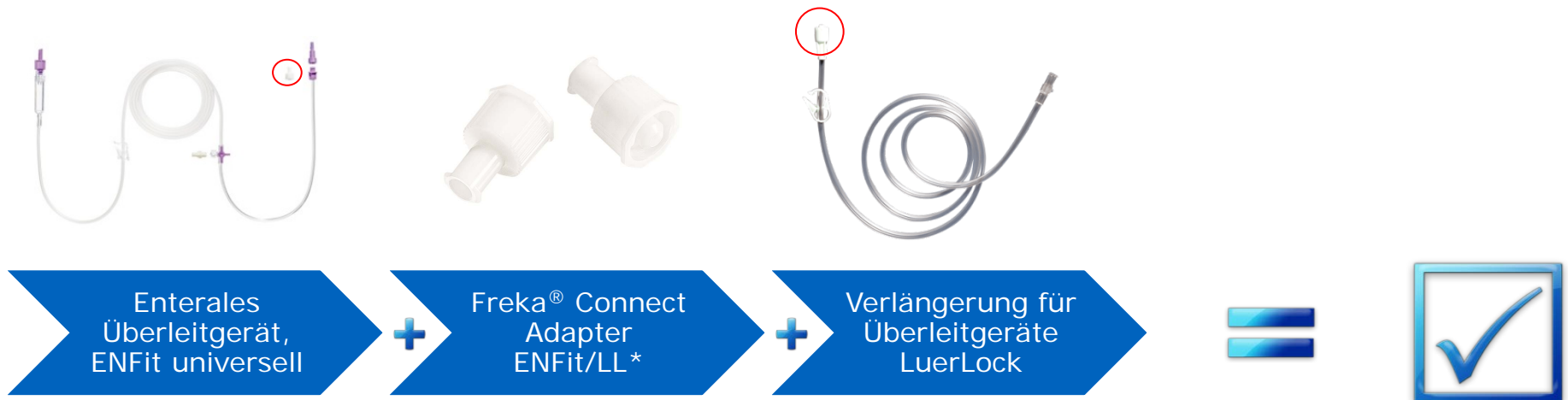

ENFit™-Verbindungssystem

Spezialkonnektionen – Lösung 6.4



Enteriales
Überleitgerät, ENFit
universell

+

Freka® Sonden-
verlängerung, 30 cm

=




ENFit™-Verbindungssystem

Spezialkonnektionen – Lösung 6.5



ENFit™-Verbindungssystem

Spezialkonnektionen – Lösung 6.6

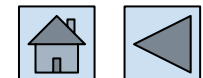

ENFit™-Verbindungssystem

Spezialkonnektionen – Lösung 6.7



Enterales
Überleitgerät, ENFit
universell

+

Freka®
Verlängerung Set 1
oder Set 2

=



wir helfen Menschen

Ernährung

Infusionen

Arzneimittel

Medizinprodukte